

C -PATH ROTARY

Kullanım Endikasyonları:

Dentinin çıkarılması ve kök kanalının şekillendirilmesi için.

Kontrendikasyonlar:

Bilinmemektedir.

Uyarılar:

Döner eđeler steril olmayan ürünlerdir ve kullanmadan önce sterilize edilmelidirler.

Tedbirler:

Bütün yeni ürünlerde olduđu gibi, kullanımında uzmanlaşıncaya kadar dikkat etmelisiniz. Olası hatalı kullanımlara karşı güvenlik tedbirleri uygulamamıza rağmen, hatırlanması gereken birçok önemli husus bulunmaktadır:

- Döner eđe kullanımı için düşük hızlı endo motor gerekmektedir.
- Endo motoru 350RPM – 2.0N seviyesinde çalıştırın.
- Uygun bir endodontik tedavi için düz hat üzerinden erişim ön koşuldur. C-PATH ROTARY eđeleri için bu durum söz konusudur.
- Her zaman minimum apikal basınç uygulayın. Eđeleri kanala doğru aşağıya bastırmayın.
- Eđenin kullanımı sırasında (eđenin kanaldan çıkarılmasının ardından) olukları sıklıkla temizleyin.
- İşlem boyunca kanala sıklıkla yıkama uygulayın ve yağlama yapın.
- Apikal alan ile önemli kavisler etrafında özellikle dikkat edin.
- Döner eđeler tek hasta kullanımı için tasarlanmış cihazlardır.

Olumsuz Reaksiyonlar:

Bilinmemektedir.

Adımlar Halinde Kullanım Talimatları:

*C -PATH ROTARY eđeleri, tek hasta kullanımı için tasarlanmıştır.

Tavsiye Edilen Eđe Atık Tasfiyesi: Kullanılmış eđeleri, Biyolojik Tehlikeli Keskin ve Delici Alet atık kutusuna koyun.

Sterilizasyon:

- Eđeleri kullanım 6ncesinde sterilize edilmelidir.
- Cihazları sabun ve ılık suyla ovalayın.
- Distile ya da deiyonize suyla iyice yıkayın.
- Havayla kurutmaya bırakın.
- Eđeleri paketleyerek otoklav tepsisine yerleřtirin.
- Temiz distile ya da deiyonize su kullanın.
- 30 dakika s6reyle 126°C'de buharla otoklavlayın

C-PATH ROTARY Kullanarak İlk řekillendirme Tekniđi:

- D6z hat eriřimi tesis edin.
- Standart paslanmaz elik K Eđesi #8, #10 ile man6el olarak geiř yolunu hazırlayın.
- Yıkamayı takiben bir apeks bulucu ile birlikte #10 K Eđesiyle alıřma uzunluđunu tespit edin.
- Yıkamayı takiben alıřma uzunluđu boyunca C-PATH #13 kullanın.
- Yıkamayı takiben alıřma uzunluđu boyunca C-PATH #16 kullanın.
- Yıkamayı takiben alıřma uzunluđu boyunca C-PATH #19 kullanın.
- NİTİ d6ner řekillendirme eđeleriyle kanal řekillendirmesine bařlamadan 6nce, bir apeks bulucu ile birlikte K Eđesi #15 ile alıřma uzunluđunuzu onaylayın.



Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd

Room 1215, Building 4, No.6558 Ting Wei Rd.,

Jinshan Dist, 201500 Shanghai, Çin



Yeniden Kullanmayın



Soğuk, Kuru Yerde Saklayın



Sadece Rx – Sadece Dental Kullanım İçin



0197

WWW.FANTA-DENTAL.COM Fanta Dental Materials Co IFU Rev.01/2019