

## **C FLEX FILE**

### **Kullanım Endikasyonları:**

Kök kanalının genişletilmesi ve güvenli bir geçiş yolu oluşturulması için kullanılan dental el eğeleridir.

### **Yapılar ve prensipler:**

- Kök kanalının genişletilmesi için kullanılan şaftlı bir dental eğedir. Dikey ileri geri ya da aşağı yukarı döndürme hareketleriyle kullanılmaktadır. Steril olmayan bir eğedir.

### **Ana malzemeler**

- Kesici parça: Paslanmaz çelik (nikel ve krom içerir)
- Gövde: Polibütilen tereftalat (PBT)

### **Kontrendikasyonlar:**

Bu ürünü, hassasiyet ve alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kullanmayın.

### **Uyarılar:**

- Her bir kullanım öncesinde sterilize edin.
- Bu ürünü dental hizmet ve tedavileri dışında amaçlar için kullanmayın. Kullanım amacı doğrultusunda kullanın.

### **Tedbirler:**

- Bu ürünü, enfeksiyonu engellemek için, otoklavlama yoluyla sterilize edin ve kullanmadan önce sterilizasyonun tamamlandığından emin olun.
- Her bir durum için en uygun tipi seçin ve genel yöntemi takip edin.
- Kullanmadan önce ağız boşluğu dışında eğe üzerinde şekil bozukluğu, çizik ya da çatlak bulunmadığından emin olun.
- Ürün başlığının ince, uzun ya da geniş olması durumunda, kırılma ya da bükülme olasılığı bulunmaktadır. Bundan dolayı, makul olmayan açılar ya da aşırı baskı kullanmaktan kaçının.
- Bu eğe, yukarıda listelenen uygulamalar dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanmayın.
- Sadece diş hekimleri tarafından kullanılabilir.
- Bu ürün, atık tasfiyesi sırasında, tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.
- Hasar görmesi ya da kirlenmesi durumunda ürünü kullanmayın.
- Kullandıktan sonra medikal temizlik maddesi ve fırçayla yıkayın ardından yapışan vücut sıvıları ve vücut dokuları gibi yabancı maddeleri yıkayarak giderin.
- Keskin köşeli parçalara sahip olmasından dolayı parmakların delinmesinden kaçınmak için ürünü dikkatli bir şekilde kullanın.
- Makul olmayan açı ve aşırı baskı uygulamak suretiyle kullanmaktan kaçının.

**Olumsuz Reaksiyonlar:**

Bilinmemektedir.

**Manipülasyon yöntemi ya da kullanım yöntemi**

Kullanım amacına göre, en uygun K EĞELERİNİ seçin ve kök kanalının genişletilmesi ve hasarlı ve enfekte dokuları çıkartmak için kullanın.

Paslanmaz çelik K eğeleri, tek hasta kullanımı için tasarlanmış cihazlardır.

Tavsiye Edilen Eğe Atık Tasfiyesi: Kullanılmış eğeleri, Biyolojik Tehlikeli Keskin ve Delici Alet atık kutusuna koyun.

**Sterilizasyon:**

- Eğeler kullanım öncesinde sterilize edilmelidir.
- Cihazları sabun ve ılık suyla ovalayın.
- Distile ya da deiyonize suyla iyice yıkayın.
- Havayla kurutmaya bırakın.
- Eğeleri paketleyerek otoklav tepsisine yerleştirin.
- Temiz distile ya da deiyonize su kullanın.
- 30 dakika süreyle 126°C'de buharla otoklavlayın

**Yüksek seviyede eğimli ve kireçlenmiş kök kanallarına erişim**

- Özel, termal sertleştirme süreci sayesinde yüksek eğilim mukavemeti
- Hassas ancak stabil, kompleks anatomiler için uygun.
- Kireçlenmiş kanalların temizlemek için ideal.



Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd

Room 1215, Building 4, No.6558 Ting Wei Rd.,

Jinshan Dist, 201500 Shanghai, Çin



Yeniden Kullanmayın



Soğuk, Kuru Yerde Saklayın



Sadece Rx – Sadece Dental Kullanım İçin



0197

[WWW.FANTA-DENTAL.COM](http://WWW.FANTA-DENTAL.COM) Fanta Dental Materials Co IFU Rev.01/2019