

	FANTA DENTAL SCM-011 ENDOMOTOR KULLANIM VE BAKIM TALİMATI	
--	--	--

FANTA DENTAL endo motor, diş hekimliği KANAL TEDAVİ aletlerinin sürekli dönme ve resiprokal harekette çalıştırılması için diş hekimleri tarafından kullanım için üretilmiş bir cihazdır
Bu cihaz, sadece yetkili diş hekimleri tarafından yalnızca hastane ortamlarında, kliniklerde veya muayenehanelerde kullanılmalıdır.

- Cihazı sökmeyin veya değiştirmeyin; FANTA DENTAL cihazın değiştirilmesi veya modifikasyonu durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 - Motorlu el aletini veya AC adaptörünü herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın.
 - Cihazı düşürmeyin.
 - Hiçbir zaman, motorlu el aletini veya diğer cihaz aksesuarlarını otoklav ünitesine veya ultrasonik tanka yerleştirmeyin.
 - ENDO MOTOR bileşenlerinin hiçbiri sterilize edilmez (ANGULDURVA hariç Temizleme, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon).
 - Cihazı ultrasonik temizleyicilere sokmayın.
 - Plastik kaplama yalıtımlı değildir, ünite üzerinde, özellikle monitörde veya elektrik prizlerinin yakınında doğrudan herhangi bir sıvı veya sprey kullanmayın.
 - Motorlu el aletinden ve AC adaptöründen çıkan kabloları kıvrımayın.
 - Bu cihaz, eğe ayrılmasını sınırlamak için bir elektronik devre ile donatılmıştır. Bununla birlikte, eğeler yinede yanlış ayarlanmış tork veya hız ya da dayanıklılığını yitirmiş eğelerin kullanımı nedeniyle ayrılabilir.
 - Endodontik eğelerin kullanımı için eğe üreticisinin TORK & RPM talimatlarına uyun.
 - Ekranda gösterilen eğe sistemi her zaman kullanımda olan eğeyle eşleşmelidir. Bu, resiprokal eğelerin ve sürekli döner eğelerin yanlış kullanımını önlemek için son derece önemlidir.
 - Sürekli dönüş için tasarlanmış eğeleri resiprokal harekette kullanmayın.
 - Resiprokal hareket için tasarlanmış eğeleri sürekli dönüşte kullanmayın.
 - Tork ve hız değerleri eğe üreticileri tarafından haber vermeden değiştirilebilir. Bu yüzden, kitaplıktaki önceden ayarlanmış değerler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
- Ekranda gösterilen tork değerleri kesindir ve yalnızca doğru şekilde bakım yapılmış ve yağlanmış anguldurvalar ile güvenilirdir.
- Orijinali dışında başka bir anguldurva veya başka azaltma oranı kullanmayın.
 - Kalibrasyon sırasında anguldurvaya herhangi bir eğe sokmayın.
 - Sterilizasyondan sonra anguldurva her yağlandığında veya değiştirildiğinde ya da en az haftada 2 kere kalibre edin
 - Anguldurvayı yağlarken, motorlu el aletine yağ sızıp sızmadığını dikkatlice kontrol edin.
 - Motorlu el aletinin yağ ile TEMASI motora ve entegre devreye zarar verebileceğinden dolayı herhangi bir nedenle motorlu el aletini YAĞLAMAYIN
 - Motorlu el aleti şaftına hiçbir zaman herhangi bir yabancı cisim sokmayın.
 - Aşırı kuvvet uygulanması halinde motorlu el aleti aşırı ısınabilir. Motorlu el aleti çok sık aşırı ısınırsa veya aşırı ısınmaya devam ederse, dağıtıcınıza başvurun.
 - Motorlu el aletini başlatmadan önce, motor ayarlarının doğruluğunu kontrol edin.
 - AC adaptörü şu aralıklar arasında değişen bir gerilim sağlanmalıdır.
- Yalnızca orijinal parçaları kullanın.

Üretici aşağıdaki durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir:

- Cihazın, kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışındaki uygulamalar için kullanımı.
- Yere düşmesi, entegreye ve motora sıvı teması
- Üretici tarafından yetkilendirilmemiş kişiler tarafından gerçekleştirilen değişiklikler ve onarımlar.
- Orijinal olmayan bileşenlerin veya STANDART BİLEŞENLER bölümünde belirtilenler dışındaki bileşenlerin kullanımı.
- Yanlış kullanım nedeniyle Eğe kırılması.
- Sterilizasyon nedeniyle aksesuarların veya cihazın kırılması: ENDOMOTOR un bileşenlerinin hiçbiri sterilize edilebilir değildir (anguldurva dışında).

