

## MC-SHAPER

### Kullanım Endikasyonları:

Kök kanalının genişletilmesi ile bileme ve cilalama yoluyla pürüzsüz ve düz hale getirilmesi için kullanılan bir dental el ekipmanıdır. Dikey ileri geri ya da aşağı yukarı döndürme hareketleriyle kullanılmaktadır.

### Yapılar ve Prensipler:

- Kök kanalının genişletilmesi için Endo tutucu ile kullanılan dental el eđesidir. Dikey ileri geri ya da aşağı yukarı döndürme hareketleriyle kullanılmaktadır.
- Steril olmayan bir ekipmandır.

### Ana Malzemeler:

- Kesici parça: Paslanmaz çelik (nikel ve krom içerir)
- Gövde : Plastik

### Kontrendikasyonlar:

Bu ürünü, hassasiyet ve alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kullanmayın.

### Uyarılar:

- Bu ürün sadece teknik bilgi sahibi diş hekimleri tarafından kullanılabilir.
- Her bir kullanım öncesinde sterilize edin.
- Bu ürünü dental hizmet ve tedavileri dışında amaçlar için kullanmayın.
- Kullanım amacı doğrultusunda kullanın.

### Tedbirler:

- Bu ürünü, enfeksiyonu engellemek için, otoklavlama yoluyla sterilize edin ve kullanmadan önce sterilizasyonun tamamlandığından emin olun.
- Her bir durum için en uygun tipi seçin ve genel yöntemi takip edin.
- Kullanmadan önce ağız boşluğu dışında ekipman üzerinde hiçbir şekil bozukluğu, çizik ya da çatlak bulunmadığından emin olun.
- Ürün başlığının ince, uzun ya da geniş olması durumunda, kırılma ya da bükülme olasılığı bulunmaktadır. Bundan dolayı, makul olmayan açılar ya da aşırı baskı kullanmaktan kaçınin.
- Gözlerinizi hasardan korumak için emniyet gözlükleri kullanın. Aynı zamanda, tozunu solumaktan kaçınmak için toz koruyucu maske giyin.
- Kazara yutma ya da düşmeden korunmak için diş izolasyon lastiđi kullanın.
- Bu ekipmanı, yukarıda listelenen uygulamalar dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanmayın.
- Sadece diş hekimleri tarafından kullanılabilir.
- Bu ürün, atık tasfiyesi sırasında, tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.
- Hasar görmesi ya da kirlenmesi durumunda ürünü kullanmayın.
- Kullandıktan sonra medikal temizlik maddesi ve fırçayla yıkayın ardından yapışan vücut sıvıları ve vücut dokuları gibi yabancı maddeleri yıkayarak gidirin.
- Ultrasonik temizleyiciyle temizlenmesinin ardından, kesici parçanın bozulmasının önüne geçmek için standına yerleřtirin.

- Keskin köşeli parçalara sahip olmasından dolayı parmakların delinmesinden kaçınmak için ürünü dikkatli bir şekilde kullanın.
- Bu ürün, NAOCL, DETA vb. maddelere uzun süre batırılması durumunda aşınabilecektir. \*\*

**Olumsuz Reaksiyonlar:**

Bilinmemektedir.

**Manipülasyon Yöntemi ya da Kullanım Yöntemi:**

Kullanım amacına göre, en uygun ebadı seçin ve kök kanalının genişletilmesi için kullanın.

MC-SHAPER ürünü, tek bir hasta üzerinde kullanılan bir ekipmandır.

Tavsiye Edilen Atık Tasfiyesi: Kullanılmış ekipmanları, Biyolojik Tehlikeli Keskin ve Delici Alet atık kutusuna koyun.

**Bakım ve Kontroller:**

MC-SHAPER, kullanım öncesinde sterilize edilmelidir.

Sterilizasyon Yöntemi:

- Cihazları sabun ve ılık suyla ovalayın
- Distile ya da deiyonize suyla iyice yıkayın
- Havayla kurutmaya bırakın
- Ürünü paketlenerek otoklav tepsisine yerleştirin.
- Temiz distile ya da deiyonize su kullanın
- 30 dakika süreyle 126°C'de buharla otoklavlayın

**Saklama ve Kullanım Süresi:**

- Yüksek sıcaklıklarda, nemli ortamlarda ve doğrudan güneş ışığı altında saklamayın. Sıvılardan uzak tutun. Oda sıcaklığında saklayın.
- Ambalaj malzemelerine hasar vermeyin ya da delmeyin.
- Ürün üzerinde, önceden bildirimde bulunulmaksızın geliştirmeler yapılabilecektir. Stok yönetimi için ilk giren ilk çıkar yöntemini kullanın.
- Ürünü, bozulmasının önüne geçmek için, mikrop kırıcı lamba altında saklamayın.



Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd

Room 1215, Building 4, No.6558 Ting Wei Rd.,

Jinshan Dist, 201500 Shanghai, Çin



Yeniden Kullanmayın



Soğuk, Kuru Yerde Saklayın



Sadece Rx – Sadece Dental Kullanım İçin



0197

[WWW.FANTA-DENTAL.COM](http://WWW.FANTA-DENTAL.COM) Fanta Dental Materials Co IFU Rev.01/2019